



Wash Sensor H Indikatorstreifen

Reinigungsindikator zur Kontrolle der Reinigungswirkung in Hohlkörper-Instrumenten, passend für die Prüfkörper Wash Sensor H, E und H Dental




Produktdetails

Die Testanschmutzung auf den Indikatorstreifen simuliert Humanblut und Gewebereste. Der Prüfkörper mit eingesetztem Indikatorstreifen imitiert ein von innen verunreinigtes Lumeninstrument.


Anwendung

Die Indikatorstreifen können mit dem Wash Sensor H, Wash Sensor H Dental sowie Wash Sensor E verwendet werden. Genauere Informationen zur Anwendung finden Sie auf den entsprechenden Produktflyern und auf unserer Website.

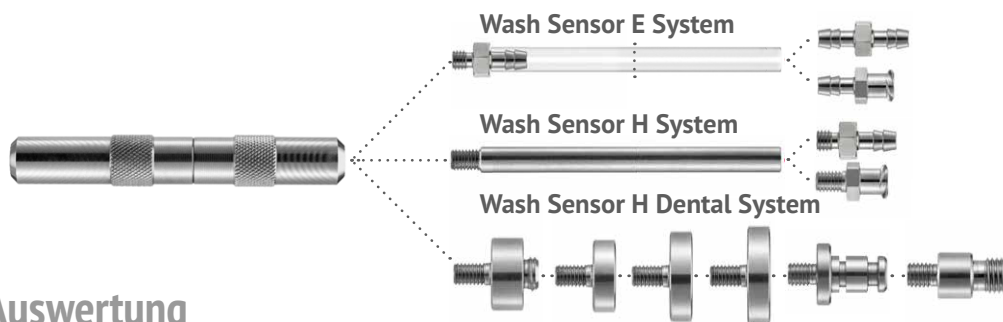

Auswertung

Überprüfen Sie den Indikatorstreifen visuell. Nur wenn die rote Testanschmutzung restlos entfernt wurde, ist ein korrekter Reinigungsprozess nachgewiesen.

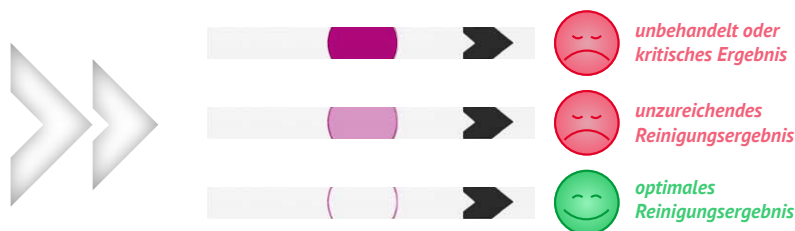

Stericop GmbH & Co. KG
Biedrichstraße 10
61200 Wölfersheim

T +49 (0) 6036 984 33 0
F +49 (0) 6036 984 33 21
info@stericop.de
www.stericop.de

Produkt	Bestellnummer	Packungsgröße	Lagerung	Haltbarkeit
Wash Sensor H Indikatorstreifen	832025	25 Stück	trocken bei Raumtemperatur	4 Jahre ab Herstellungsdatum
	832050	50 Stück		
	832100	100 Stück		

Gemäß
RKI/KRINKO 2012
Anlage 3
Unsere Empfehlung: Test 1 x tgl. mit der normalen
Beladung des Gerätes durchführen und immer verwenden,
wenn Kritisch B Instrumente gereinigt werden.
Entspricht
DIN EN ISO
15883-5:2021