



# Wash Sensor Halterung

Universalhalterung aus Edelstahl zur Aufnahme der Reinigungsindikatoren Wash Sensor RDG und Wash Sensor U



## Produktdetails

Eine langlebige Halterung aus rostfreiem Metall, in die die Indikatorplättchen einfach eingeschoben werden. Dank des praktischen Clips lässt sich der Test mühelos in jedes Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) einhängen. Unsere Universal-Halterung ist kompatibel mit den Reinigungsindikatoren Wash Sensor RDG sowie Wash Sensor U.

## Anwendung Wash Sensor RDG

1. Das Indikatorplättchen seitlich in die Halterung einschieben. Achten Sie darauf, dass die rote Testanschmutzung zur Hälfte sichtbar bleibt.
2. Den Wash Sensor in das RDG einlegen oder einhängen. Die offene Vorderseite muss dabei ins Innere des Geräts weisen.



## Anwendung Wash Sensor U

1. Einfach das Indikatorplättchen seitlich und mit der Testanschmutzung nach vorne/oben gerichtet bis zur Markierung in die Halterung einschieben. Achten Sie darauf, die Testanschmutzung dabei möglichst nicht zu berühren.
2. Über jedem Ultraschallgeber je eine mit Wash Sensor U bestückte Halterung einlegen. Dazu die Halterung mit der Testanschmutzung nach oben so legen, dass sich der sichtbare Teil des Indikatorplättchens über dem Ultraschallgeber befindet.



Weitere Informationen zur Anwendung und Auswertung finden Sie auf den Produktflyern Wash Sensor RDG bzw. Wash Sensor U und auf unserer Website.



Stericop GmbH & Co. KG  
Biedrichstraße 10  
61200 Wölfersheim

T +49 (0) 6036 984 33 0  
F +49 (0) 6036 984 33 21  
info@stericop.de  
www.stericop.de

Produkt	Bestellnummer	Packungsgröße
Wash Sensor Halterung	830001	1 Stück